

# EMOFLUOR<sup>®</sup> PROTECT GEL

## PROFESSIONAL



ПРЕДОТВРАЩАЕТ ЭРОЗИЮ  
УСТОЙЧИВАЯ И ДОЛГОВРЕМЕННАЯ ЗАЩИТА  
ЗАМЕТНО БОЛЕЕ ГЛАДКАЯ ПОВЕРХНОСТЬ ЗУБОВ

С запатентованной и отмеченной наградами технологией CUROLOX<sup>®</sup>



Мгновенная защита от эрозии и профилактика кариеса  
в одном продукте!

# EMOFLUOR® PROTECT GEL

## PROFESSIONAL



### ВЫСОКОЭФФЕКТИВНАЯ ПРОФИЛАКТИКА

EMOFLUOR® **PROTECT GEL** PROFESSIONAL быстро формирует устойчивый, кислотостойкий защитный слой на зубе. Этот богатый минералами слой обеспечивает эффективную и длительную защиту эмали и дентина от эрозии.

Защитный слой, который мгновенно делает поверхность зубов заметно более гладкой, придает зубам чистый и блестящий вид. Вместе с составом, оптимизированным фосфатом кальция и фторидом, EMOFLUOR® **PROTECT GEL** PROFESSIONAL регенерирует поверхность эмали и предотвращает образование кариеса.

### ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Защитное действие EMOFLUOR® **PROTECT GEL** PROFESSIONAL основано на клинически испытанной технологии CUROLOX® (самоорганизующиеся пептиды), удостоенной награды Swiss Technology® Award.

Самоорганизующиеся биомиметические молекулы, обладающие очень высокой аффинностью к тканям зуба, формируют 3D-матрицу. Она прикрепляется к твердым тканям зубов (дентин и эмаль), как застежка-липучка. Связывание 3D-матрицы с ионами кальция твердых тканей зуба обеспечивает устойчивый и долговременный защитный слой.

Идеальная защита после отбеливания и профессиональной чистки зубов



# EMOFLUOR<sup>®</sup> PROTECT GEL

## PROFESSIONAL



### ЗАЩИТА ОТ КИСЛОТ И ПРОФИЛАКТИКА КАРИЕСА В ОДНОМ ПРОДУКТЕ


- Защита от кислот и эрозии эмали и дентина
- Профилактика кариеса
- Заметно более гладкие и блестящие зубы

Эмаль, поврежденная кислотой (рН 3, 1ч) после обработки зубной пастой (фторид 1450 ppm)

Эмаль, защищенная от кислот (рН 3, 1ч) с EMOFLUOR<sup>®</sup> PROTECT GEL PROFESSIONAL

#### КИСЛОТНАЯ ЭРОЗИЯ


Неповрежденная поверхность эмали

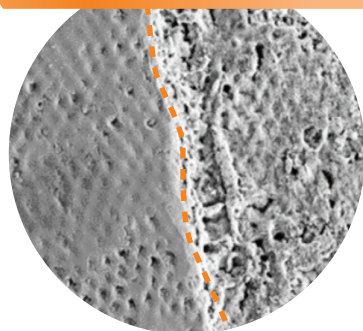

Только с зубной пастой (фторид 1450 ppm)

#### ЭРОЗИЯ ОТСУТСТВУЕТ

Поверхность эмали, защищенная с EMOFLUOR<sup>®</sup> PROTECT GEL PROFESSIONAL

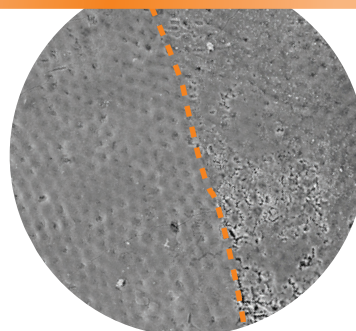


Неповрежденная поверхность эмали

Эффективная,  
долговременная  
защита от  
кислот

# EMOFLUOR® PROTECT GEL

## PROFESSIONAL

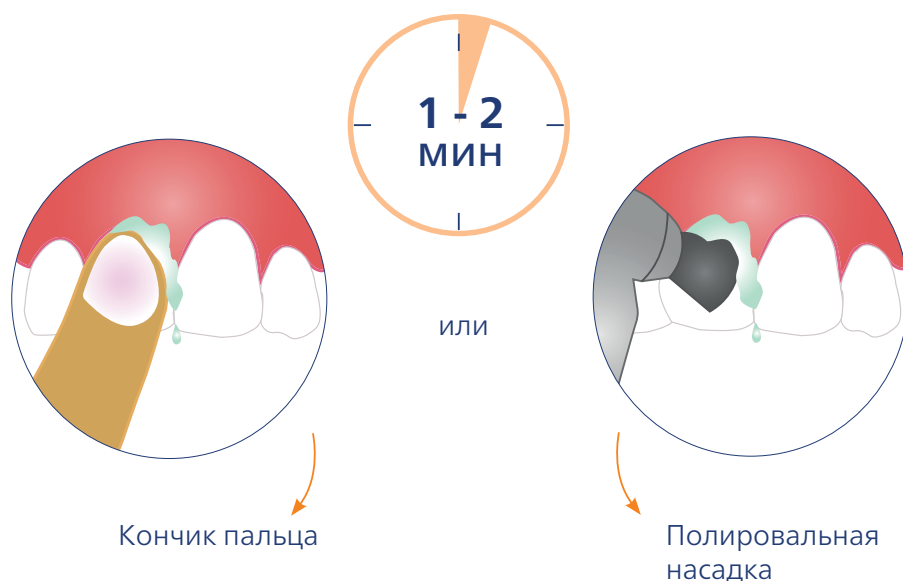

### ПРОСТОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

- Нанесите гель EMOFLUOR® **PROTECT GEL PROFESSIONAL**
- Оставьте на 1-2 минуты
- Сплюньте остатки геля, при необходимости

### ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- Защита от эрозии
- Для применения после профессиональной чистки зубов или отбеливания
- В качестве защиты и профилактики кариеса. В том числе для пациентов с высоким риском развития кариеса; во время ортодонтического лечения; ксеростомии; корневого кариеса
- Для назначения пациентам в качестве интенсивной профилактики в домашних условиях

### ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

10 x 3 мл туба EMOFLUOR® **PROTECT GEL PROFESSIONAL** (артикул № 11.1349)

3 мл туба EMOFLUOR® **PROTECT GEL PROFESSIONAL** (артикул № 11.1449)



Dr. Wild & Co. AG  
Hofackerstrasse 8 | CH-4132 Muttenz  
[www.wild-pharma.com](http://www.wild-pharma.com) | [www.wild-dental.com](http://www.wild-dental.com)

Представитель: ООО Свисс-Трейд  
ул. Большая Васильковская 41Б | Украина, 01024 Киев  
тел.: 0 800 500 362 | [www.swisstrade.com.ua](http://www.swisstrade.com.ua)

 Swiss professional oral care